

# PROCEDURA DISINFEZIONE MEZZI E STRUMENTI E ATTREZZATURA



## “CAPTOSIL”

**DISINFETTANTE A BASE DI CLORO DILUITO GIA’  
PRONTO ALL’USO**

**Utilizzare per:**

- Pulizia superfici venute a contatto col paziente
- Pulizia pavimento ambulanza
- Pulizia attrezzature utilizzate
- Pulizia termometro “ termoscan “
- Pulizia occhiali protettivi

**METODO DI UTILIZZO**

**Spruzzare il prodotto sul posto da pulire.**

**Lasciare agire alcuni secondi, sfregare con panno di carte e lasciare asciugare**

**Per la pulizia degli occhiali spruzzare abbondantemente su tutta la superficie, lasciare agire qualche minuto, asciugare con carta**



## “BACTICYD”

**DISINFETTANTE A BATTERICIDA AREOSOL**

**Utilizzare per:**

- Sanificazione superfici venute a contatto col paziente
- Sanificazione vano sanitario ambulanza
- Sanificazione attrezzature utilizzate
- Sanificazione termometro “ termoscan “
- Sanificazione occhiali protettivi

**METODO DI UTILIZZO**

**Spruzzare il prodotto sul posto da sanificare e lasciare agire alcuni secondi. Si asciuga da solo**

**Per la sanificazione del vano sanitario dell’Ambulanza, aprire tutti gli armadietti, spruzzare all’interno del vano per 10 secondi continuativi, chiudere il vano sanitario, aspettare circa 20 minuti poi arieggiare.**